

※車の窓は、指示があるまで開けないでください。

1. 会場到着後、「検査キット」と「受付票」をお渡しいたします。
会場内の誘導に従いお進みください、スタッフ・係員より駐車スペースへご案内いたします。
2. そのまま車内でお待ちください。スタッフ・係員がお伺いいたします。
3. 受付票に、陽性者の氏名および関係性・お名前・住所・ご連絡先(携帯電話番号等)ご記入ください。
4. 採取方法の手順に従い、検体(だ液)の採取をおこなってください。
5. 採取後、検体回収場所までお車で移動し、スタッフ・係員が身分証明書及び受付票の確認を致します。
確認後、案内する指定の回収箱へ封入した検体と受付票をそれぞれの回収箱へ投函ください。
同梱されている使用済み消毒用エタノール綿、ストローはお持ち帰りいただき、ご自宅で廃棄をお願い致します。
6. 検体をお渡し頂いた後は、お気をつけてご帰宅ください。

ご注意

- ※ PCR検査会場では、スタッフ・係員の案内に従って行動してください。
- ※ 検体の採取の際には必ず採取方法の手順をご確認ください。
- ※ 車両移動のため、車間距離には十分にお気をつけください。

② 検体(だ液)の採取方法

① 検査キットは2種類あります。

検査会場・検査日の状況により、実際検査キットと写真が異なる場合がございますので会場スタッフ係員の指示に従って採取をおこなってください

検査キット内容



OIST









AVSS


- ① 採取容器(チューブ)
- ② 封入用チャック付きポリ袋
- ③ 消毒用エタノール綿
- ④ ストロー OISTのみ
- ⑤ 受付票
- ⑥ 検体採取方法のご案内
- ⑦ QRコードのシール
- ⑧ ゴミ持ち帰り用袋



採取方法・提出方法

OIST

- 01 QRコードのシールを受付票と採取容器に、目盛りが正確にみえるように貼ってください。

※イメージ例
- 02 採取容器のキャップをあけて、付属のストローを差しします。

- 03 ストローを口に含み、採取容器にだ液を0.5mlまでいれてください。
※できるかぎりキッチリと0.5mlまでいれてください。おおくても1mlまでにしてください。
※だ液が容器から漏れ出たり、外側につかないようご注意ください。

- 04 ストローを採取容器からはずし、キャップをしっかり締めてください。
※キャップがゆるかったり、斜めに締めた場合、だ液が漏れ検査出来ないことがあります。

- 05 付属のエタノール綿で、採取容器を拭き消毒をしてください。

- 06 付属の封入用チャック付きポリ袋に採取容器を入れ、ポリ袋をエタノール綿で拭き、受付票とあわせて各回収ボックスにそれぞれ投函してください。


AVSS

- 01 バーコードのシールを受付票と右のイラストの向きで貼ってください。

- 02 採取容器のキャップをあけて、だ液を入れてください。

- 03 しっかりとキャップ閉めて、付属のエタノール綿で採取容器を拭き消毒してください。

- 04 付属の封入用チャック付きポリ袋に採取容器を入れ、ポリ袋をエタノール綿で拭き、受付票とあわせて各回収ボックスにそれぞれ投函してください。


新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から会場内にゴミ箱を設置しておりませんので、同梱されている使用済み消毒用エタノール綿、ストローはお持ち帰りいただき、必ずご自宅で廃棄をお願い致します。ご協力のほど、よろしくお願い致します。